

## Max OptiFresh očné kvapky 10 ml

**Príbalový leták a návod na použitie** Tento príbalový leták obsahuje dôležité informácie o bezpečnom používaní výrobku. Pozorne si ho prečítajte.

### **Charakteristiky:**

Očné kvapky udržiavajú vlhkosť kontaktných šošoviek a upokojujú oči. Zvyšujú komfort nosenia kontaktných šošoviek. Odporúčajú sa na denné nosenie, častú výmenu a jednorazové mäkké kontaktné šošovky.

### **Zloženie:**

Sterilný izotonický roztok - hydroxypropylmetylcelulóza 3 mg/ml, chlorid sodný, kyselina boritá, chlorid draselný, perboritan sodný.

### **Návod na použitie:**

Použite 2-3 kvapky a v prípade potreby niekoľkokrát mrknite. Po použití nasadte späť pevne uzáver.

### **Upozornenie:**

- Aby ste zabránili kontaminácii, nedotýkajte sa konca kvapkacieho uzáveru oka ani iných predmetov.
- Fľaštičku ihneď po použití pevne zatvorte
- Uchovávajte pri teplote od 5 do 30 °C
- Nepoužívajte výrobok po uplynutí 30 dní od prvého otvorenia
- Nepoužívajte výrobok s uplynutou dobou použiteľnosti
- Nepoužívajte, ak ste alergický na niektorú zo zložiek tohto výrobku
- Ak problémy pretrvávajú, okamžite šošovky vyberte a kontaktujte svojho očnému lekárovi
- Nepoužívajte súčasne so žiadnymi očnými liekmi, okrem prípadov, keď vám to odporučí váš očný lekár
- Dodržiavajte postupy dennej starostlivosti o kontaktné šošovky podľa odporúčania vášho očnému lekárovi
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Nepoužitú kvapku vyhodte do koša a prázdnu fľaštičku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu

**Dovozca:** WIXI, s.r.o., Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady, IČ: 28518772

**Výrobca:** STERICON PHARMA PVT, Bangalore-99, Karnataka, India